

医 05 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000


ネイルアクト®

【禁忌・禁止】

1. 本品の原材料に対して過敏症又はアレルギーのある場合は使用しないでください。
2. ひび割れたり、もろくなった爪に使用しないでください。[爪が破損するおそれがあるため。]
3. 爪周囲に強い炎症がある場合は使用しないでください。[症状が悪化するおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造及び寸法

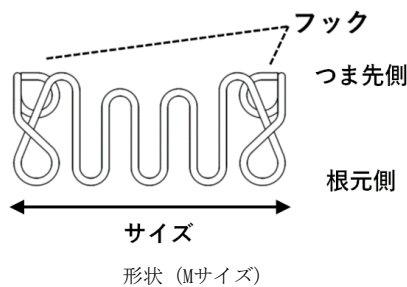

サイズ一覧

サイズ	対応している爪幅
Sサイズ (13mm)	14 - 17mm
Mサイズ (16mm)	18 - 21mm
Lサイズ (20mm)	22 - 25mm

※形状は、サイズにより異なります。

2. 材質

ステンレス鋼 (SUS304)

3. 原理

ばねの弾性力を利用して、爪のわん曲を矯正します。


【使用目的又は効果】

巻き爪（過度にわん曲した爪）を矯正し、改善した爪形状を維持します。

【使用方法等】

＜使用前の確認・準備＞

- (1) 本品のフックが引っかかるよう、装着する爪が3mm程度伸びていることを確認してください。
- (2) 爪の角が残っていることを確認してください。
- (3) 本品の装着前に、装着する爪の周辺を清潔にしてください。

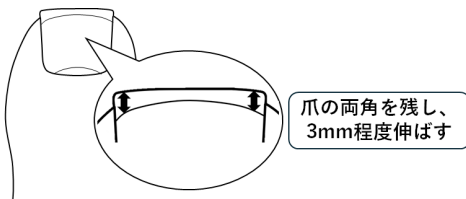

＜装着方法＞

本品の装着は、爪の正面から取り付ける方法（前装着）と爪の端から取り付ける方法（横装着）の二通りの方法があります。いずれかの方法で取り付けてください。

装着に慣れない方は、前装着をお勧めします。ただし、矯正力は横装着より弱くなります。

1. 前装着

- (1) 片方のフックを爪の前縁にひっかけます。
- (2) 本品が跳ね飛ばないように、フックをひっかけた部分をしっかり指で押さえながら、もう片方のフックを爪の前縁にひっかけて、奥まで押し込みます。
- (3) 外れないよう医療用テープなどで固定します。

2. 横装着

- (1) 片方のフックを爪の側縁にひっかけます。
- (2) 本品が跳ね飛ばないように、フックをひっかけた部分をしっかり指で押さえながら、もう片方のフックを爪の前縁にひっかけます。
- (3) (1)のフックをしっかりと指で押さえながら、後からひっかけた(2)のフックを指でゆっくりと爪の側縁へ移動させます。
- (4) 外れないよう医療用テープなどで固定します。

＜取り外し方法＞

固定した医療用テープなどをゆっくり剥がし、本品をしっかりと押さえながら、前にずらして爪から取り外してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 着脱時は、本品の跳ね飛びを防止するため、本品をしっかりと指で押さえてください。
- (2) 装着中は、市販の医療用テープなどで、本品を固定してください。
- (3) 固定したテープは、定期的に交換してください。
- (4) 運動、入浴、サウナ等の際は、本品を予め外してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品が傷のある皮膚に接触する可能性がある場合は、傷が治るまで使用を控えてください。
- (2) 本品がMRI装置に吸着する可能性があるため、MRI検査を受ける際は、本品を外してください。
- (3) 装着後に痛みや炎症、かぶれ等の異常があらわれた場合には、直ちに使用を中止して、医療機関を受診してください。
- (4) 本品をはさみなどで切る、変形させるなどの加工をしないでください。
- (5) 本品に変形、変色、破損など異常がみられる場合は使用しないでください。
- (6) 使用状況や症状により目安が変わりますが、本品を4～8週間程度使用しても改善傾向が認められない場合は、本品の使用を中止し、医療機関を受診してください。

＜その他の注意＞

靴下やストッキングを脱ぎ着する際に、本品が引っかかることがあるため注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・直射日光、高温多湿を避けて、清潔な場所に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・本品を外したあとは水やエタノールなどで洗浄し、よく乾かしてから保管してください。

＜耐用期間＞

本品の交換時期の目安は4週間（[自己認証（当社データ）による]）です。ただし、上記期間内でも、本品がわん曲したまま戻らなくなったり、変色したりするなど製品が劣化していると思われる場合は、使用せず、新しいものを使用してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

マルホ株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津 1-5-22

お問い合わせ窓口

マルホ株式会社 製品情報センター

〒531-0071 大阪市北区中津1-11-1

TEL：0120-12-2834（医療関係専用ダイヤル）

TEL：0120-45-8712（一般のお客さま専用ダイヤル）

製造

マルホ発條工業株式会社

®登録商標

製造販売



maruho マルホ株式会社

大阪市北区中津1-5-22

取扱説明書を必ずご参照ください。